


Der einzigartige ATP Behandlungsansatz von Teoxane

Ihre systematisch medizinische Herangehensweise für bestmögliche Ergebnisse basierend auf der Anatomie des Gesichtes, den geeigneten Techniken und optimalen Produkten.



A Anatomie & Patientenanalyse

- Detaillierte Patientenbeurteilung mit eingehender **Analyse der Anatomie und Gesichtsdynamik**.
- Beurteilung der **individuellen Anforderungen und Wünsche** des Patienten unter Berücksichtigung der ethnischen Besonderheiten, Geschlecht und Alter.

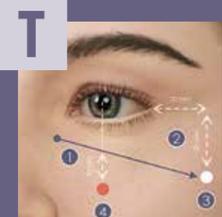

T Technik


- Ermittlung der indikations-spezifischen **richtigen Technik, Tiefe und Füllervolumen**.
- Verschiedene Techniken können sich nach Berücksichtigung der **Risikobeurteilung** als geeignet erweisen.



P Produkt

- Auswahl der optimalen **Dermal-Filler mit geeigneten rheologischen Eigenschaften**, angepasst an die Indikation und die gewünschten Ergebnisse.

Risikobeurteilung der Gesichtsanatomie

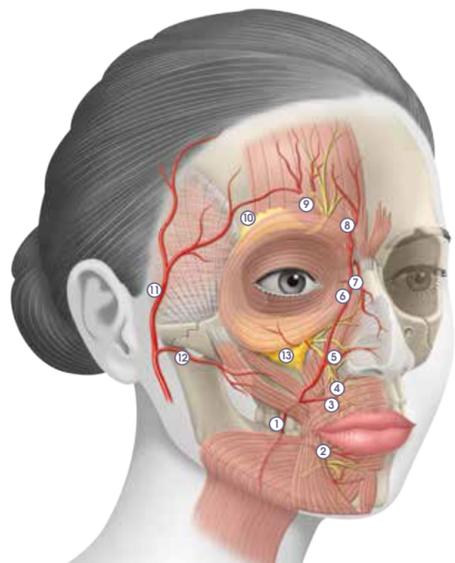


Gefäße in tiefen Gesichtsschichten

- 1 Gesichtsarterie
- 2 Untere labiale Arterie
- 3 Obere labiale Arterie
- 4 Subalare Arterie
- 5 Seitliche Nasenarterie
- 6 Augenwinkelarterie
- 7 Dorsale Nasenarterie
- 8 Supratrochleare Arterie
- 9 Supraorbitale Arterie
- 10 ROOF (Retro-Orbicularis Oculi Fat)
- 11 Oberflächliche Schläfenarterie
- 12 Transversale Gesichtsarterie
- 13 Medial/laterales SOOF

Oberflächliche Gefäße

- A Gesichtsarterie
- B Mentaler Nerv
- C Horizontale labiomentale Arterie
- D Untere labiale Arterie
- E Obere labiale Arterie
- F Infraorbitale Arterie
- G Augenwinkelarterie
- H Supratrochleare Arterie
- I Supraorbitale Arterie und supraorbitaler Nerv

Die anatomischen Abbildungen sind ausschließlich zur Veranschaulichung dargestellt und können nicht auf die reale Anatomie Ihrer Patienten übertragen werden. Nur für die Verwendung durch Fachkräfte vorgesehene Medizinprodukte. Weitere Informationen finden Sie in den vor Ort freigegebenen Anweisungen zur Verwendung des jeweiligen Produkts. Kontakt für die Meldung von Vorkommissen in Zusammenhang mit Medizinprodukten: medical@teoxane.com

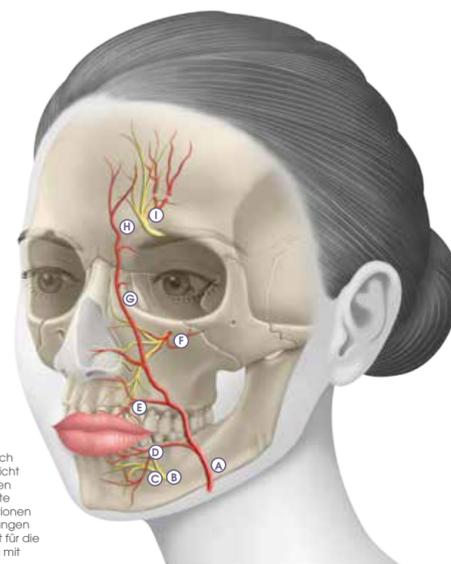

TEOSYAL RHA®

Entwickelt für **natürliche Ergebnisse** bei dynamischen Gesichtsbewegungen



RHA®
1

RHA®
2

RHA®
3

RHA®
4

Höchste Elastizität
Passt sich schnell der Mimik an

Höchste Formstabilität
Langanhaltende Hebekraft im Ruhezustand und in der Bewegung

TEOXANE

Bringen Sie mehr Schönheit in **das Leben Ihrer Patienten und Patientinnen**.

DER FÜHRENDE SCHWEIZER EXPERTE IN DER WISSENSCHAFT DER HYALURONSÄURE

BESUCHEN SIE TEOXANE.COM/DE

Medizinprodukte sind nur für den Gebrauch durch Fachpersonal bestimmt. Produktindikationen und -verfügbarkeit variieren von Land zu Land.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den lokal geltenden Produktinformationen. Kontakt für Materialvigilance-Meldungen: medical@teoxane.com

40210/00-0924-GER

TEOXANE. INJECT MORE BEAUTY INTO YOUR LIFE

TEOXANE



Die **TEOSYAL®** Filler-Produktreihe
Toolbox für **medizinische Experten**

TEOXANE. INJECT MORE BEAUTY INTO YOUR LIFE

TEOXANE

Für jede Indikation **der optimale Filler**



Die TEOSYAL® Filler-Produktreihe



Teoxane erfüllt als erster Hersteller von Dermalfillern die hohen Anforderungen der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR). Unsere Dermalfiller bieten höchste Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität.

20+ Jahre Innovationen

94 Länder in denen Teoxane verwendet wird

10⁶ Millionen von Filler-Behandlungen

Die Teoxane Expert Toolbox

TEOSYAL RHA® – natürliche und resiliente Ergebnisse mit der neusten Filler-Generation

	RHA® 1	RHA® 2	RHA KISS®	RHA® 3	RHA® 4
Schwerpunktindikationen	Feine dynamische Falten + Barcode-Falten + Hals + Dekolleté	Mäßig ausgeprägte Falten + Stirn, Glabellafalten + Lippen (dezent Volumen)	Dezent dynamisches Lippen Re-Shaping (Kontur und dezent Volumen)	Tiefe dynamische Falten + NLF, Marionettenfalten + Lippen (ausgeprägtes Volumen) ¹	Volumen in erweiterten dynamischen Bereichen + Wangen + Gesichtskonturen
Rheologie	Stretch (Elastizität)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	Strength (Hebekraft)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Injektionstiefe	Oberflächlich: Dermis	Oberflächlich: Dermis, Lippe	Subdermal, intramuskulär	Intermediär: Mittlere Dermis, tiefe Dermis, Lippe	Intermediär: Subkutan (Oberflächliche Fettkompartimente) Tief: Supraperiostal (Tiefe Fettkompartimente)
Hyaluronsäure-Konzentration	15 mg/ml	23 mg/ml		23 mg/ml	23 mg/ml
Modifizierungsgrad (MoD) BDDE-/Vernetzungsgrad*	1,9 %	3,1 %		3,6 %	4,0 %
Packungsinhalt	2 x 1 ml	2 x 1 ml	2 x 0,7 ml	2 x 1 ml	2 x 1,2 ml
Nadel in der Packung	30G x 1/2"	30G x 1/2"		27G x 1/2"	27G x 1/2"
Wirkdauer**	über 12 Monate	12 bis 18 Monate		12 bis 18 Monate	bis 18 Monate

Lidocain-Wert liegt bei allen Fillern bei 0,3 %

* BDDE: 1,4-Butandiol diglycidyl ether
** TEOSYAL®-Produkte sind nicht permanente Dermalfiller auf Hyaluronsäurebasis. Die Wirkdauer ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie z. B. dem Injektionsverfahren (Menge, Tiefe, Bereich usw.) und dem Stoffwechsel des Patienten (Fähigkeit des Körpers, das Produkt aufzunehmen).

TEOSYAL PureSense Spezialanwendungen

REDESITY® 1	REDESITY® 2	ULTRA DEEP	KISS®	GLOBAL ACTION	DEEP LINES	ULTIMATE
Beauty Booster, Festigung, Hydratation, Vorbeugung der Hautalterung von Gesicht, Hals und Dekolleté	Korrektur von Augenringen, Tränenrinne	Volumenaufbau in den Bereichen + Wangenknochen + Gesichtskonturen + Kinn & Jawline	Harmonisierung der Lippenkontur und ausgeprägtes -volumen	Mäßig ausgeprägte Falten + Stirn, Glabellafalten + Lippen (dezent Volumen)	Tiefe dynamische Falten + NLF, Marionettenfalten + Lippen (pralles Volumen)	Volumen in erweiterten dynamischen Bereichen + Wangen + Gesichtskonturen
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Oberflächlich: Dermis	Tief: Supraperiostal	Tief: Supraperiostal	Subdermal, intramuskulär	Oberflächlich: Mittlere Dermis, Lippen	Intermediär: Subkutan bis Supraperiostal	Intermediär: Subkutan (Oberflächliche Fettkompartimente) Tief: Supraperiostal (Tiefe Fettkompartimente)
15 mg/ml	15 mg/ml	25 mg/ml	25 mg/ml	25 mg/ml	25 mg/ml	22 mg/ml
Unvernetzte HA + 14 essentielle Elemente ²	Unvernetzte und vernetzte HA 5,5% + 14 essentielle Elemente ²	10,0 %	8,0 %	8,7 %	9,2 %	10 %
1 x 3 ml oder 2 x 1 ml	2 x 1 ml	2 x 1,2 ml	2 x 1 ml	2 x 1 ml	2 x 1 ml	2 x 1 ml
30G x 1/2"	30G x 1/2"	25G x 1/2"	27G x 1/2"	30G x 1/2"	27G x 1/2"	27G x 1/2"
mind. 3 Monate	über 12 Monate	12 bis 18 Monate	12 bis 18 Monate	6 bis 9 Monate	6 bis 9 Monate	12 bis 18 Monate

1) TEOSYAL RHA® 2 und TEOSYAL RHA® 3 sind ebenfalls geeignet, um den Lippen mehr Volumen zu verleihen und/oder ihre Kontur zu verbessern. Je nach Landeszulassung.
2) Glycine, Lysine, Threonine, Proline, Isoleucine, Leucine, Valine, Arginine, Glutathione, N-acetylcysteine, -I-polic acid, Zinc, Copper, B6